


Utilisation de l'écouvillon FecalSwab™ : recherche de BMR / BHRe

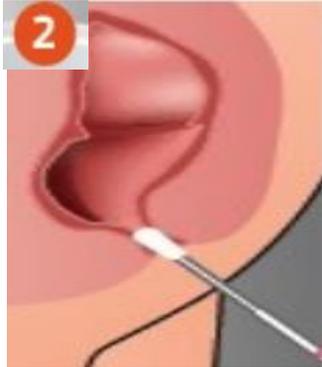

- Faire une friction hydro-alcoolique et mettre des gants à usage unique
1. Ouvrir le sachet et sortir le tube bouchon vert et l'écouvillon
 2. Introduire l'écouvillon à une profondeur de 2-3 cm et tourner délicatement
 3. Vérifier que la pointe de l'écouvillon est entourée de matières fécales visibles
 4. Plonger l'écouvillon dans le milieu de transport et frotter les parois du tube pour mettre en suspension les matières fécales
 5. Casser la tige au niveau du point de rupture prévu en pliant la tige à 180°
 6. Visser convenablement le capuchon et agiter pour homogénéiser
- Retirer les gants et faire une friction hydro-alcoolique
- Etiqueter convenablement le tube et le mettre dans un sachet d'examen
 - Envoyer l'examen avec la demande étiquetée au nom du patient

Code	
BMR 1	EPC, BLSE, ERV
BMR 2	BLSE
BMR 3	EPC
BMR 4	ERV
BMR 5	ERV, EPC

ATTENTION /!\ LA RECHERCHE DE SARM EST NON CONCERNEE PAR LES FECAL SWAB ET S'EFFECTUE TOUJOURS SUR ECOUVILLON AMIES